ポケマム 2 操作マニュアル【iPhone/iPad】

専用アプリインストール

まず右の QR コードを読み込んで、ご自身の iPhone/iPad にポケマム 2 専用アプリ 「WirelessUSG.Z」をインストールしてください。

QR コードを使ってインストールする以外に、iPad や iPhone の App Store で検索し、 専用アプリをインストールすることも可能です。



エコー (ポケマム 2 機器本体) 各部位の説明

- ① 電源オン/オフ&ライブ/フリーズボタン
- ② バッテリー容量が表示されます。
- ③ ワイヤレス接続の状態が表示されます。



ワイヤレス(Wi-Fi)接続方法

1. エコー(ポケマム 2 機器本体)の電源入れる

電源を入れるときは、オン/オフボタン①を押してください。電源が入ると、バッテリー容量②とワイヤレス接続の状態③が青く表示されます。



2. Wi-Fi 無線接続する

エコーとスマートフォン / タブレットなどの端末を、Wi-Fi 機能を使って接続してください。まずスマートフォン / タブレットの【設定】から Wi-Fi をオンにします。

3. ネットワークのリストからエコーの SSID を探します。「SS」から はじまる SSID を選択します(SSID の下 3 桁はエコー本体に記載されているパスワー ドの下 3 桁と同じ数字です)。

Wi-Fi のパスワードは、エコー本体の背面に表記されている アルファベットと数字です。

4. Wi-Fi 接続完了後にアプリを起動し、ポケマム 2 メニューの 【フリーズ】ボタンを押してエコーのフリーズを解除してください。 フリーズを解除するとエコーの動画が映るようになります。





動画撮影の設定(撮影時間の延長)

ワイヤレス(Wi-Fi)接続が完了したら、ポケマム 2 専用アプリ「WirelessUSG.Z」を起動してください。



ポケマム 2 メニューの【設定】ボタンを選択し、 「再生フレームレート」を 100 から 1000 へ変更してください。





「再生フレームレート」は「100」「200」「500」「1000」から選択できますが、かならず「1000」に設定してください。 (初期設定では約 15 秒程度録画が可能です。「再生フレームレート」を「1000」に設定すると約 120 秒から 180 秒 の動画を録画できるようになります。)

写真/動画保存の設定(データの保存ができない場合のみ)

1. iPhone/iPad の【設定】から、ポケマム 2 の専用アプリ「WirelessUSG.Z」を選択します。






2.「WirelessUSG.Z」のアクセス許可について、【写真】設定が「すべての写真」になっているか確認し、もしなっていなければ「すべての写真」に変更してください(「すべての写真」の設定になっていない場合、ポケマム 2 で撮影した写真や動画が保存できない可能性があるので、注意してください)。



動画の撮影 / 保存方法

- 1.【フリーズ】ボタンをタップすると撮影が始まります。
- 2. もう一度【フリーズ】ボタンをタップすると撮影が停止します。
- 3.【動画の保存】をタップすると iPhone/iPad の (通常の動画や写真と同じ) フォルダに動画が保存されます。

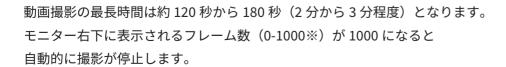





インターフェース紹介



①ダイナミックレンジ:画像のダイナミックレンジ/露光範囲を調整します。

②フォーカス:画像のフォーカスを調整します。

③コメント入力:画像にコメントを入力します。

④深度:深度の調節をします。

⑤再生:画像のフリーズ後にそれまでの動画をリコール再生します。

⑥画像の保存:スマートフォンやタブレットに画像を保存します。

⑦動画の保存:スマートフォンやタブレットに動画を保存します。

⑧ゲイン+:画像のゲイン、露光や明るさを上げます。

⑨ゲイン -: 画像のゲイン、露光や明るさを下げます。

⑩フリーズ:画像のフリーズ、フリーズ解除をします。

⑪設定:動画の再生フレームレートや Wi-Fi チャンネルを選択します。基本的にチャンネルを変える必要はありませんが、どうしても変えなくてはいけないときは「2.4G CHANNEL 1」に設定してください。

エコーの充電

電池残量が少ない場合、エコーの充電が必要になります。エコー先端のゴム栓を引き抜き、 エコーと充電器を USB ケーブルで接続します。



充電中はバッテリー容量表示ランプが点滅します。グリッドは充電量を表しています。4つのグリッドライトが表示され、さらにライトが点滅していない場合、バッテリーが完全に充電されている状態であることを示しています。充電が完了したら、USBケーブルを取り外し、液体などによる損傷を防ぐため、ゴム栓をエコーの端に差し込んでください。



クリーニング

エコーのクリーニングは、ウェットティッシュ等を使用して行ってください。

株式会社 BORDER (ボーダー) ポケマムお客様相談係 〒108-0072 東京都港区白金 3-7-18-503

> Mail: pokemam@borders.co.jp WEB: https://pockemam.com